

製品仕様

換気様式	
従量式/従圧式	
換気モード	
ACMV/SIMV/SPONT/VG保証 (VOLUME GUARANTEE)	
B-LEVEL (Bi-Phasic) /NPPV	
各種コントロール	
一回換気量	30~2,200ml
フロー波形	矩形波/漸減波
吸気圧	5~60cmHzO
吸気時間	0.1~3秒 又は 流量 2~100L/min
呼吸回数	1~99回/分
プッシャーサポート(PS)	0~60cmHzO
PS立上り速度	1~5level
PS最大吸気時間	0.1~3秒
PS呼気認識	10~70%
PEEP/CPAP	0~30cmHzO
圧トリガ	-9.9cmHzO~0.1cmHzO
フロートリガ	1~20LPM
酸素濃度	21~100%
VG保証モードコントロール	
Vt保証 (一回換気量保証) 又は MV保証 (分時換気量保証)	
Vt保証目標値	30~2,200ml
PSV上限	5~60cmHzO
PSV下限	0~60cmHzO

B-LEVELモードコントロール		
高圧		3~60cmHzO
低圧		0~30cmHzO
時間上限		1~5秒
時間下限		0.5~5秒
I:E比逆転		30:1
アラーム		
高呼吸回数、低呼吸回数、低呼気一回換気量、低吸気一回換気量、無呼吸間隔、低圧、高圧、低分時換気量、高分時換気量、低酸素濃度、高酸素濃度、呼吸回路確認、酸素センサ点検、バッテリー容量低下、バッテリー容量なし、酸素供給不良		
寸法		
295 (W) × 291 (L) × 249 (H) mm		
重量		
6.9kg		
酸素		
高圧		35~90psi
低圧		0~15L/min
電源		
AC:100~240V (50/60Hz)		
DC:12~15V		
バッテリー: ホットスワップ式最大12時間作動 (充電時間3時間)		
規格		
IP34 (防塵防水)、RTCA DO-160F (航空機搭載)		

品名	パーツナンバー	JANコード
Flight60	V100-0001-PK	4582244696127
Flight60 回路サポートアーム	G70-20000-26	4582244696226
Flight60 クイックリリースキット	KIT-0012	4582244696219
Flight60 ロールスタンド	FLI-0001-61	4582244696172
ピン式酸素用耐圧管	OA0015-02	4582244692525
リング式酸素用耐圧管	OA0015-04	4582244692549
ディスポインレットフィルター	V11-35300-60	4582244696141
低流量酸素ポート(5個入)	SUB-0044	4582244696202
着脱バッテリー	V60-19000-67	4582244696189
ウォーターバックポール	550525	4582244691887
ボールクランプブラケット(太)	50003290	4582244693102
テストラング成人用	6011	4582244691320
テストラング小児用	6012	4582244691191
ディスポーザブルフレキシブルチューブ	50480000	4582244694086
Flight60 フローセンサーキット(10個入)	V64-0013	4582244696134
Flight60 移動用呼吸回路	V64-50010	4582244696660

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。



Flight 60[®]

人工呼吸器

承認番号: 22500BZ100023000



専任製造販売業者
 **パシフィックメディコ株式会社**
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
 TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

製造元
 **Flight Medical Innovations Ltd.**
 フライト メディカル イノベーション社(イスラエル)

04010419J-W

院内から搬送と様々な状況で使用可能

ディスプレイ
7インチカラータッチスクリーンで、日本語表示とわかりやすい設計です

アラーム
視覚的に見やすいプライマリアラームと、内容を指すアラームインジケータが同時に赤色で点滅します

コントロールキー
基本操作は11のキーで構成されており、初めての方でも安心です

ネブライザ
換気量補正機能があり、安全な吸入療法が可能です

口元フローセンサー
精度の高いモニタリングが可能です

● **対象5kg以上**
幼児～成人と幅広い患者に対応

● **デュアルピストン駆動源**
静音で消費電流は最大1.25A

● **高機能の換気様式**
換気量保証 (VOLUME GUARANTEE)
2相式換気 (Bi-Phasic)
圧補正従量式換気 (PRVC)

● **酸素ブレンダと酸素センサが内蔵**
21%～100%の設定可能で実測値も表示

● **搬送に最適**
防塵防水で航空機内でも安全に使用可能

● **内部バッテリー+着脱バッテリー**
内部バッテリー4時間ホットスワップ/着脱バッテリー8時間の最大12時間駆動

①着脱バッテリーを本体後部のスロットに挿入します。

②挿入後、時計方向にダイヤルを回すとロックされます。



◀ システムセットアップ例

加温加湿器 (オプション)



加温加湿器 PMH1000plus

- 水量低下(透過式赤外線センサ)アラームの搭載
- 9段階の温度設定(ヒータープレート部分)の簡単操作
- IEC 60601-1:2005に適合した安全安心設計



加温加湿器 PMH7000plus

- デュアルサーボ(出口/口元温度)コントロール
- 侵襲 (IPPV)・非侵襲 (NPPV) モードの自動/手動設定
- IEC 60601-1:2005に適合した安全安心設計
- 軽量設計(約1.7kg)



加温加湿器 PMH8000

- 相対湿度コントロール、相対湿度モニタ(温度&湿度プローブ使用時)
- IPPV(侵襲)NPPV(非侵襲)モードの自動設定と手動設定
- 空焚きアラーム搭載(温度&湿度プローブ使用時)